

Veiledning til HÅRPRØVETAKING for DNA-basert avstammingskontroll på hest og ponni

 <p>1. Finn frem til øvre ende på halen, splitt hårene</p>	 <p>2. Ta en tjafs med ca 30 hårstrå rundt 5 cm fra enden på halen</p>	 <p>3. Snurr hårtjafsens godt rundt pekefingeren og napp oppover</p>
	<p>4. Dra slik at tjafsens løsner fra halen, napp raskt og bestemt</p>  <p>5. Slik bør den se ut, med hårrøtter i enden</p>  <p>6. Hårrøttene må være med, ellers må prøven tas på nytt</p>	
	<p>7. Hårrotprøven bntes gjerne med en vanlig maskerings-tape ca 1-2 cm fra enden av hårrøten.</p> <p>Hvis mulig, merk prøven med aktuelt NPA-nummer.</p> <p>Den lange enden uten hårrøtter kan klippes og kastes.</p>	
	<p>8. NB! Legg hårprøvene i riktig konvolutt.</p>	<p>9. Send hårprøvene tilbake til stambokfører sammen med de utfylte hestepassapirene.</p>

NB! Innleverte prøver som ikke er i samsvar med denne instruksjonen vil det ikke kunne utvinnes DNA for lagring ifra.